

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказанием для применения грелки являются гнойные и острые воспалительные процессы, сердечная недостаточность, онкологические заболевания, желчнокаменная и мочекаменная болезни.

Если у Вас чувствительная кожа или имеется повреждение кожного покрова, то при прогревании рекомендуется подложить под грелку тканевую салфетку. Это также необходимо при прогревании участков тела детей до 3 лет.

Рекомендуется длительность прогревания не более 30 минут.

ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО ЛЕЧЕБНОГО ЭФФЕКТА ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ О ПОРЯДКЕ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ.

В случае порезов или проколов оболочки раствор не вытекает из грелки, так как мгновенно самокристаллизуется. Однако *Дельта-Терм* после этого больше не подлежит восстановлению. Если все же соль попала на тело, советуем Вам просто смыть ее водой.

После длительного использования в грелке могут появиться кристаллы в виде снежинок, которые не влияют на работу грелки-аппликатора. Их можно удалить, подержав грелку в кипящей воде в течение 1 часа. Для избежания появления таких "снежинок" рекомендуется хранить *Дельта-Терм* в жидком состоянии.

ВНИМАНИЕ! Если приобретенная Вами грелка находится в твердом состоянии, это означает, что она самокристаллизовалась из-за случайного удара или низкой температуры во время транспортировки. Это естественное явление. Если оно произошло, то перед первым использованием восстановите грелку.

ГАРАНТИИ И АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ!

Грелка-аппликатор изготовлена в соответствии с авторским правом фирмы ДЕЛЬТА на полезную модель. Свидетельство № 93052505.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 1 г

ДАТА ВЫПУСКА

ДАТА ПРОДАЖИ

КОНТРОЛЕР



ТЕЛЕФОН • АКС: (095) 195-96-50, 195-96-51
Адрес: Москва, Новопесчаная ул., д. 6, к. 2

Тепло, которое везде с тобой

ОДОБРЕНО МИНЗДРАВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТУ 9452-00107669108-93, ОКП 945247



ДЕЛЬТА-ТЕРМ

СОЛЕВАЯ МНОГОРАЗОВАЯ ГРЕЛКА-АППЛИКАТОР

- / Обеспечивает локальный лечебный эффект.
- / Сухое тепло в любое время и повсюду.
- / Мгновенный нагрев в помещении и на улице.
- Принимает формы согреваемой поверхности.
- / Предельно просто, гигиенично и практично.
- Долговечно, надежно и безопасно.
- / Модификации грелки для согревания различных участков тела.
- / Лечебный холод после замораживания.

Действенное физиотерапевтическое средство профилактики и лечения теплом остеохондроза, радикулита, ишиаса, гайморита, миозита, наружного отита, артрита суставов, неаллергических форм хронического насморка. Эффективно для предварительного разогревания участков тела перед массажем и при любяже печени.

ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ГРЕЛКА ~

- прогревающих различных участков тела в любое время в любом месте путем мгновенного получения сухого тепла за счет собственной энергии;
- физиотерапевтического воздействия сухого тепла, аналогичного использованию парафина;
- обеспечения температурного комфорта дома, на рабочем месте, в транспорте и в походных условиях;

Грелка-аппликатор выполнена из экологически чистых материалов. Она представляет собой прочный пластиковый пакет с нетоксичным раствором соли, широко применяемой в медицинской и пищевой промышленности. При кристаллизации раствора выделяется тепло.


СОЛЕВЫЕ ГРЕЛКИ НАДЕЖНЫ И БЕЗОПАСНЫ.

КАК ПОЛУЧИТЬ СУХОЕ ТЕПЛО

Для включения грелки-аппликатора несколько раз с усилием вдавите и отпустите ребристую металлическую сторону кнопки, плавающей внутри грелки. Это вызовет процесс кристаллизации раствора, похожий на распространение белой волны по грелке.

За несколько секунд грелка разогреется до температуры $+54^{\circ}\text{C}$, дающей ощущение приятного тепла.

После распространения тепла по всей грелке нужно энергично размять в руках образовавшийся в ней "теплый снег" и приложить к согреваемому месту. Дельта-Терм сохраняет тепло в течение 20...60 минут в зависимости от размера, температуры окружающей среды и от того, находится ли грелка под одеялом или одеждой.

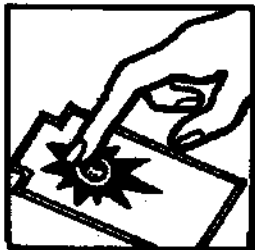

В удобное для Вас время грелка легко переводится в исходное (жидкое состояние), в котором может находиться неограниченный срок.

КАК ВОССТАНОВИТЬ ГРЕЛКУ

Оберните *Дельта-Терм* тканевой салфеткой и положите в кипящую воду не менее чем на 15...20 минут. За это время кристаллы в пакете полностью исчезнут.

Достаньте грелку-аппликатор из воды и охладите ее до комнатной температуры.

Ваша грелка теперь готова к повторному использованию.

Если во время остывания раствор в грелке самокристаллизовался, это означает, что она кипятилась недостаточно долго для растворения всех кристаллов. В этом случае процесс кипячения следует повторить.

В период охлаждения вы можете использовать грелку-аппликатор, сохраняющую некоторое время тепло, так же как традиционную грелку.



Во избежание повреждения оболочки грелки советуем Вам не пользоваться острыми предметами при извлечении ее из кипятка.

НЕ СЛЕДУЕТ ПОМЕЩАТЬ ГРЕЛКИ В МИКРОВОЛНОВУЮ ПЕЧЬ И ПЫТАТЬСЯ ВОССТАНАВЛИВАТЬ ИХ БЕЗ ВОДЫ.

Грелка-аппликатор может также хранить в течение некоторого времени тепло или холод.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕШНЕГО ТЕПЛА

Для получения температуры выше $+54^{\circ}\text{C}$ оберните жидкую грелку тканевой салфеткой и подержите в горячей воде. Температура нагрева грелки регулируется температурой воды.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕШНЕГО ХОЛОДА

Поместить жидкую грелку-аппликатор в морозильную камеру холодильника на 10...15 минут. За это время грелка охладится до температуры $+6...+7^{\circ}\text{C}$. Холодная грелка удобна для физиотерапевтического применения при мигрени, носовом кровотечении, кровоизлияниях, жаре, синяках (кровоподтеках), растяжении связок и мышц, укусах насекомых, а также для создания температурного комфорта в жаркий день.

ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ ЖИДКОЙ ГРЕЛКИ ДО TEMПЕРАТУРЫ НИЖЕ -8°C ПРОИСХОДИТ САМОКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ РАСТВОРА.